

BWipes

Einwegtücher für die hygienische
Flächendesinfektion

- ✓ hygienische Sicherheit
- ✓ universelle Praktikabilität
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ zur Trängung mit allen üblichen
Flächendesinfektionsmitteln



Vliestuchrolle

Die BWipes bestehen aus einem 100%-igen Polyester-
vlies und stellen somit eine optimale Wirkstoffabgabe
bei der Anwendung sicher. Zudem sind sie aufgrund
der Quervernetzung extrem reißfest und strapazierfä-
hig.

Das BWipes Desinfektionsverfahren ist sofort einsetz-
bar. Jede Vliestuchrolle ist mit einem Chargenetikett
versehen, womit Charge, Ansatz- und Verfalldatum
der Desinfektionslösung dokumentiert werden.

Durch die Einzelblattentnahme aus dem wieder-
verschließbaren Spendersystem sind die Medi
Wipes sehr sparsam im Verbrauch.

Anwendungsbereiche

Die BWipes können zur Flächendesinfektion und Rei-
nigung von Gegenständen, Oberflächen und in Be-
reichen ohne Wasseranschluss, in Einrichtungen wie
Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen,
Rettungsdiensten und in der Lebensmittelindustrie
sowie in Gemeinschaftseinrichtungen angewendet
werden.

Anwendung



1. Handschuhe anlegen.
2. Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in gereinigten,
desinfizierten, trockenen Feuchttuch-
spender einsetzen.
3. Die Vliestuchrolle mit der empfohlenen Füllmenge tränken.
4. Vliestuch von unten durch die Entnahmeöffnung führen.
5. Beigefügtes Chargenetikett ausfüllen und aufkleben.

Stand: 11-2021

BWipes

Einwegtücher für die hygienische Flächendesinfektion

Gutachten

Die Wirksamkeit der Anwendungslösung nach 28 Tagen mit marktüblichen Flächendesinfektionsmitteln im Spendersystem ist für die BWipes durch externe, unabhängige Labors begutachtet.

Für folgende Flüssigkeiten ist ein 4 Felder Flächentest Gutachten auf Anfrage erhältlich:

- MediSept rapid „melone“
- Biguanid Fläche N
- Incidin Extra N
- Incidin Plus
- Microbac forte

Zubehör

Für jede BWipes Vliestuchrolle ist ein passender Spendereimer erhältlich. Die entsprechenden Größen sind unter „Lieferformen“ vermerkt. Der PopUp mit seiner sternförmigen Einkerbung im Entnahmesystem und der zugehörige Verschlussdeckel verhindern eine Austrocknung der Vliestücher. Hierzu ist ein eigenständiges Produktdatenblatt verfügbar.

Um die wiederverwendbaren Spendereimer nach dem Verbrauch einer Rolle aufbereiten zu können, sind zu jeder Rolle je ein Reinigungs- und Desinfektions-Sachet erhältlich (siehe „Varianten“: BWipes Typ II). Durch die Anwendung der Sachets wird eine sichere und einwandfreie Aufbereitung sichergestellt.

Weiter sind zu den Rollen ein Folienbeutel mit Befestigungsring und ein Timestrip Zeitindikator vorhanden (siehe „Varianten“: BWipes Typ III). Diese Variante bietet das Komplettpaket hinsichtlich der Kontrolle und Risikominimierung bei der Verwendung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem.

Varianten

BWipes Typ I
(Artikelnummer siehe „Lieferformen“)
Vliestuchrolle einzeln in Folie eingeschweißt und geschrumpft

BWipes Typ II
(Artikelnummer siehe „Lieferformen“ + Endung „SA“)
Vliestuchrolle einzeln in Folie eingeschweißt und geschrumpft
+ WHR Reinigungs-Sachet
+ WHR Desinfektions-Sachet

BWipes Typ III
(Artikelnummer siehe „Lieferformen“ + Endung „AI“)
Vliestuchrolle einzeln in Folie eingeschweißt und geschrumpft
+ WHR Reinigungs-Sachet
+ WHR Desinfektions-Sachet
+ Folienbeutel und Befestigungsring
+ Timestrip Zeitindikator

Umweltinformationen

Unsere Produkte werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.

Stand: 11-2021

BWipes

Einwegtücher für die hygienische
Flächendesinfektion

Lieferformen

Tuch- qualität	Material	Blattmaß	Blatt- zahl	Artikel-Nr.	VPE	Spendersystem
soft	PET	ca. 30 x 30cm	30		6 Rollen	Dose „mini“
soft	PET	ca. 30 x 30cm	30		6 Rollen + 1 Dose	Dose „mini“
soft	PET	ca. 30 x 30cm	60		8 Rollen	Eimer „midi“
soft	PET	ca. 30 x 30cm	70		8 Rollen	Eimer „midi“
soft	PET	ca. 30 x 30cm	100		6 Rollen	Eimer „maxi“
soft	PET	ca. 30 x 15cm	60		6 Rollen	Eimer „maxi“
soft	PET	ca. 30 x 15cm	140		8 Rollen	Eimer „maxi“
soft	PET	ca. 20 x 36cm	40		12 Rollen	Eimer „XXL“
soft	PET	ca. 20 x 36cm	90		6 Rollen	Eimer „XXL“

Stand: 11-2021